

Anti-ruido personalizado

Passtop® T
Passtop® N
Passtop® C



Manual Passtop®


Sumario

Consejos de utilización	3
Colocación	
Extracción	
Mantenimiento	4
Anti-ruido personalizado	
Passtop® C	5
Passtop® T	6
Passtop® N	7
Garantía	8

2

Consejos de utilización

Comprobar que los protectores estén limpios antes de colocarlos en su conducto auditivo. Si es necesario, leer las recomendaciones que vienen a continuación.

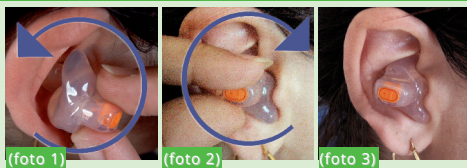

Colocación

El protector derecho viene siempre marcado por un punto rojo.
Coger este protector con la mano derecha y colocarlo frente a su conducto auditivo, con la parte del filtro situada hacia el exterior (foto 1).
Introducirlo suavemente hasta que este colocado en el fondo de la oreja (foto 2).
Comprobar a continuación que el protector esté bien colocado moviéndolo de delante hacia atrás (foto 3).
Una vez colocado correctamente en su oreja, notará que el protector se adapta perfectamente a su morfología. No obstante podría necesitar un pequeño periodo de adaptación para que se acostumbre perfectamente al producto.

Extracción

Para quitar el protector, cogerlo entre el pulgar y el índice y tirar suavemente con un ligero movimiento de rotación hacia atrás. ¡Cuidado! No se debe tirar nunca sobre los cordones o cable, ya que se podría causar daños irreversibles a su protector. Consejo: estos tapones no deberían usarse donde haya riesgo de que el cordón de unión pudiera ser enganchado durante el uso.

3

Mantenimiento

Sus protectores requieren una limpieza diaria y una manipulación con manos limpias.
Les recomendamos una gama de productos específicamente creados para la limpieza de sus protectores. El uso de otros productos puede tener efectos nefastos sobre los componentes de sus protectores, ya que sus formulas han sido elaboradas específicamente para permitir una utilización en total seguridad. Preconizamos por lo tanto una asepsia semanal mediante las pastillas Protanet para los Passtop. Asegúrese que no quede ningún rastro de humedad en el conducto acústico, mediante una pera secadora.
Un depósito de cerumen puede obstruir la extremidad de sus protectores. En este caso, límpielo con un pequeño cepillo para liberar el conducto de salida. Utilizar el estuche entregado con sus protectores para guardarlos después de su uso. ¡Cuidado! La protección ofrecida por los tapones se verá severamente dañada si no se llevan de forma permanente en los lugares ruidosos o no se respetan las indicaciones de colocación y ajuste. Ciertas sustancias químicas pueden producir un efecto adverso sobre el producto. Para más información debería contactar con el fabricante.

Instrucciones de almacenamiento, mantenimiento:

Los protectores deben guardarse en un lugar fresco y seco, protegidos del frío y la luz, almacenados de tal manera que queden protegidos del polvo, la grasa o los productos químicos. Cuando no están en uso, deben conservarse en sus embalajes originales. Se debe controlar regularmente el estado de los protectores.

Legenda de las tablas anteriores:

FHz:	frecuencia en Hz	SNR:	reducción global del nivel de ruido
Mf dB:	atenuación media en dB	H:	media de atenuación en frecuencias altas
Sf dB:	desviación estándar	M:	media de atenuación en frecuencias medias
APV f dB:	=(Mf-Sf) protección asumida	L:	media de atenuación en frecuencias bajas

4


Passtop® C



Resultados acústicos conformes a la norma NF EN 352.2 : 2003 / Règlement UE 2016/425 du 09/03/2016 applicable à este tipo de EPI.


	FHz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Passtop® C	MfdB	13,4	12,1	15,4	21,3	22,5	31	38,8	37,2
	Sf dB	8	5,7	4,0	3,5	2,8	2,9	3,5	6,9
	APVf dB	5,4	6,3	11,4	17,7	19,6	28,1	35,3	30,3

	SNR	H	M	L	N°CE
Passtop® C	22,6	27,1	19,3	13,0	2754/2840/159/08/19/0956

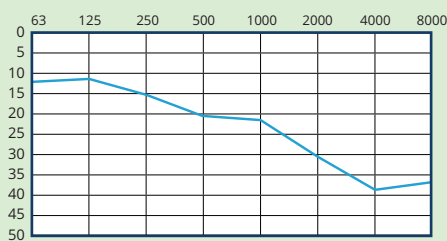

5

Passtop® T

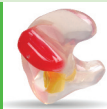

Resultados acústicos conformes a la norma NF EN 352.2 : 2003 / Règlement UE 2016/425 du 09/03/2016 applicable à este tipo de EPI.

	FHz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Passtop® T	Mf dB	14,9	14,3	15,6	19,1	19,1	28,7	38,9	34,1
	Sf dB	5,0	5,3	3,5	3,3	3,7	3,2	3,7	6,7
	APVf dB	10,0	9,0	12,1	15,8	15,4	25,6	35,2	27,3

	SNR	H	M	L	N°CE
Passtop® T3	20,8	23,6	16,9	13,9	2754/2840/159/09/19/0961



Durante las primeras utilizations de los Passtop, la percepción de su entorno sonoro le puede parecer deformada. Es el resultado de la atenuación selectiva: atenuación importante de las frecuencias agudas (las más

6


Passtop® N



Resultados acústicos conformes a la norma NF EN 352.2 : 2003 / Règlement UE 2016/425 du 09/03/2016 applicable à este tipo de EPI.

	FHz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Passtop® N	MfdB	17,4	16,7	18,7	20,5	21,7	29,7	40,0	35,5
	Sf dB	8,1	5,3	3,9	3,1	5,2	2,8	5,0	6,4
	APVf dB	9,2	11,4	14,9	17,3	16,4	27,0	35,0	29,1

	SNR	H	M	L	N°CE
Passtop® N	22,3	24,7	18,3	15,9	2754/2840/159/09/19/0959

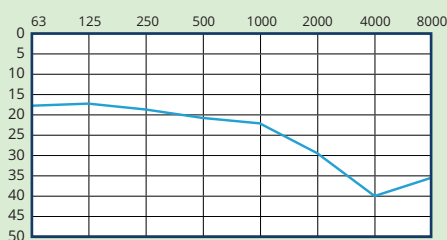

Perjudiciales para su oído) y atenuación moderada de las frecuencias graves (frecuencias de la palabra). Los Passtop dejan pasar la palabra y paran los ruidos perjudiciales.

7

Garantía

Se garantizan sus productos a partir de la fecha de fabricación y durante el periodo indicado en la etiqueta de identificación en el dorso de esta caja. Si a lo largo de este periodo de garantía, sus productos resultan defectuosos, póngase en contacto con su distribuidor. En el caso de defecto de materia o de fabricación, el fabricante procederá, de manera gratuita, a la reparación o sustitución de las piezas defectuosas acorde a las condiciones expuestas a continuación. Toda devolución de material vendrá imperativamente acompañada de la etiqueta de identificación situada en el dorso de esta caja. El fabricante se reserva el derecho de rechazar la garantía del producto en caso de ausencia o ilegibilidad de dicho documento.

La garantía no reembolsa, ni cubre los deterioros siguientes:

Cualquier modificación realizada al producto, cualquier uso de productos de limpieza o accesorios (cordones,...) que no sean los recomendados por el fabricante.

Accidentes, rayo, inundación, incendio, pérdida, robo o cualquier causa que sobrepase la responsabilidad del fabricante. Reparaciones efectuadas por terceros.

La garantía no cubre ninguno de los siguientes puntos:

Mantenimiento periódico, reparación o sustitución de piezas por desgaste normal.

Gastos de transporte y todo riesgo de transporte relacionado directamente o indirectamente a la garantía del producto.

Todo defecto, resultado de una adaptación incorrecta a la oreja, se debe señalar imperativamente dentro de un plazo de 3 meses después de la fecha de fabricación.

Antes de cualquier inserción de un protector auditivo en la oreja, se realizará imperativamente un examen otoscópico por un médico o miembro del cuerpo médico. El uso de este tipo de protector es única responsabilidad del usuario que reconoce no tener contra-indicación médica o patología del oído.



POLIG. TORRELARRAGOITI
ES-48170 ZAMUDIO (VIZCAYA)
Tel. : +34 94 452 30 24
Fax : +34 94 452 30 78

Sello del vendedor

8